

Rýchlo spojka 420


39 005 2521, 721 5104 9

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Účel a použitie

Rýchlo spojka 420 slúži na spojenie turbín s pripojením typu Multiflex® na hadicu dentálnej súpravy štandardu 6-ISO Midwest. Zabezpečuje rýchlu výmenu turbín, otočnosť turbíny o 360°, slúži ako zdroj svetla.

Obr.1

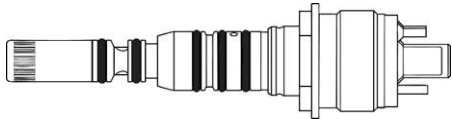

* Multiflex® je registrovaná značka spoločnosti Kaltenbach&Voigt Co. KG, Biberach

2. Technické údaje

- pripojenie na hadicu 6-ISO Midwest
- zdroj svetla LED, dodávané CHIRANA Medical, a.s.
- napájacie napätie 3,2 - 3,3V, prúd 60-80mA

3. Dôležité pokyny



Rýchlo spojka je určená len pre ošetrovanie v oblasti stomatológie.

4. Základné vybavenie dodávané s výrobkom

Tesnenie	1 ks
Kľúč	1 ks
"O" krúžok 3,8x1,15	2 ks
"O" krúžok 6,5x1	3 ks


5. Náhradné diely

Tesnenie	č. 741 2569 8
"O" krúžok 3,8x1,15	č. 3130 5103
"O" krúžok 6,5x1	č. 3130 5104
Kľúč	č. 341 2618 4
LED žiarovka	č. 036 2510 4

6. Pripojenie k hadici – Obr.2


Rýchlo spojku na turbínovú hadicu typu 6-ISO Midwest orientovane nasadíte a priskrutkujete otáčaním matice hadice. Potom dotiahnite pomocou kľúča - Obr. 3. Touto montážou vznikne spoj pre pohonový vzduch, chladiaci vzduch, chladiacu vodu, spätný vzduch a svetlo.

Obr.2

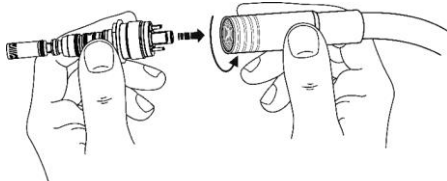

Obr.3



 Pred prvým nasadením turbíny na rýchlo spojku je vhodné "O" krúžky zľahka namazať SMIOIL sprayom. Iný mazací prostriedok sa nedoporučuje. Turbínu potom nasuňte na rýchlo spojku a smerom dozadu zatlačte až počuteľne zaklapne.

7. Údržba výrobku


7.1. Vonkajšie čistenie – obr.4


Rýchlo spojku je možné zvonku čistiť alkoholovým roztokom.

Obr.4



7.2. Dezinfekcia – obr.4

 Povrch rýchlo spojky doporučujeme dezinfikovať antivírusovými dezinfekčnými prostriedkami pôsobiacimi i proti vírusu HIV, t.j. dezinfekciou rozprašovacou alebo stieracou metódou.

 Nedoporučuje sa rýchlo spojky do dezinfekčných prostriedkov ukladať alebo ponárať. Nepoužívajte žiadne silné alkalické, alebo chlór obsahujúce dezinfekčné prostriedky. Rýchlo spojky nečistite, prípadne nedezinfikujte v ultrazvukových kúpeľoch.

7.3. Sterilizácia




Rýchlo spojka sa nesmie sterilizovať.



7.4. Výmena "O" krúžkov – Obr.5

V prípade, že na rýchlo spojke vznikne netesnosť je nutné vymeniť gumové "O" krúžky. Krúžok sa prstami vysunie zo zápichu tak, aby sa vzniknutá slučka dala posunúť smerom dopredu a krúžok sa dal sňať.


Obr. 5

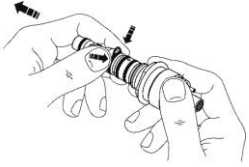

7.5. Výmena LED žiarovky – Obr.6

V prípade zlyhania LED žiarovky ju je možno nahradiť len originálnym dielom od výrobcu Chirana Medical, a.s. alebo od autorizovaného obchodno-servisnej organizácie

Obr.6

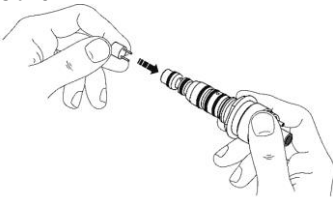

8. Opravy a servis

Zabezpečuje Chirana Medical, a.s. alebo autorizované obchodno-servisné organizácie.

9. Použité symboly



Dátum výroby



Varovanie



Pozri návod na použitie



Zákaz sterilizácie



Nosiť ochranné rukavice



Nelikvidovať spolu s
komunálnym odpadom



Výrobca



Krehké, zaobchádzať
opatrne




Uchovávať v suchu

Hranice teploty



Hranice vlhkosti

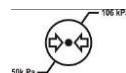

Hranice atmosférického
tlaku

10. Likvidácia prístroja



Po skončení životnosti, prístroj (nádrie) nesmie byť likvidovaný s bežným odpadom.

Likviduje sa s ostatným priemyselným odpadom, t.j. oddeleným zberom.

Oddelený zber a elektroodpad sa odovzdáva distribútorovi, alebo spracovateľovi odpadu pre opätovné použitie, alebo recykláciu.

Zber odpadu, t.j. prístroj alebo nádrie zabezpečujú distribútori (zmluvné servisné organizácie, resp. zmluvní servisní pracovníci), ktorí prístroj (nádrie) odoberú od spotrebiteľa po vyčistení, predpísanej dezinfekcii i sterilizácii a odovzdajú spracovateľovi odpadu, ktorý má súhlas pre nakladanie s nebezpečným odpadom.

VÝROBCA:



Chirana Medical a.s. Stará Turá
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 STARÁ TURÁ, P.O.Box 57
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel. : +421 32 775 2323 Fax.: +421 32 775 3221
+421 918 714 000
+421 918 714 001
+421 918 714 002

medical@chirana.eu

www.chirana.eu

Dátum poslednej revízie – 01/2020



Registrované ochranné známky CHIRANA
Registered trade marks CHIRANA

