

Györscsatlakozó 420


39 005 2521, 721 5104 9

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Alkalmazás

A 420 györscsatlakozó a Multiflex® csatlakozású turbinák és a 6-ISO MIDWEST végződésű tömlők összekötéséhez szolgál. Lehetővé teszi a turbina gyors cserélését, fordulását 360° Fényit biztosít a turbina kézidarabnak.

Kép.1

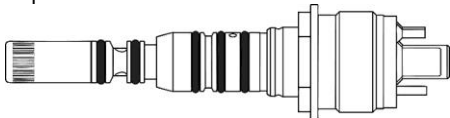

* Multiflex® - a Kaltenbach&Voigt Co. KG, Biberach cég regisztrált márkája

2. Műszaki adatok

- Végződése a 6-ISO Midwest (fényes) tömlőre csatlakozik
- Fényi táp LED, a CHIRANA Medical, a.s. saját tartozéka
- Feszültség 3,2 - 3,3V, áram 60-80mA

3. Fontos utasítások



A györscsatlakozó csak a fogászatban használható.

4. Alap tartozékok

Tömítés	1 db
Kulcs	1 db
"O" gyűrű 3,8x1,15	2 db
"O" gyűrű 6,5x1	3 db


5. Alkatrészek

Tömítés	sz. 741 2569 8
"O" gyűrű 3,8x1,15	sz. 3130 5103
"O" gyűrű 6,5x1	sz. 3130 5104
Kulcs	sz. 341 2618 4
LED izzó	sz. 036 2510 4

6. Csatlakozás a tömlőhöz – kép.2


A györscsatlakozót a 6-ISO Midwest tömlőn lévő anyához csavarozzuk, és az anyát meghúzzuk kép. 2, ezután rögzítjük kulccsal kép.3 , így meggátoljuk a csatlakozás áteresztését. Ezzel a csatlakozással létrejön a meghajtó levegő, visszajövő levegő, hűtő levegő, hűtő víz és a fény csatlakozása.

Kép.2

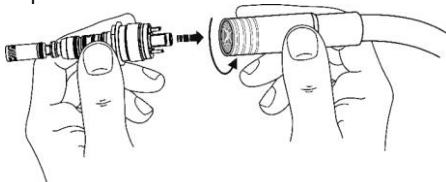

Kép.3




-  A turbina első csatlakozása előtt szükséges a györscsatlakozón lévő "O" gyűrűket SMIOIL sprayel – ábr.3 finoman megkenni. Más gyártmányú kenőanyag használatát nem javasoljuk. Turbinát ezután helyezték rá a györscsatlakozóra és egy hátrafelé mozdulattal nyomják meg, amíg nem hallatszik, hogy beakadt.

7. Karbantartás


7.1. Külső tisztítás – kép.4


A györscsatlakozó külsejét lehetséges alkoholos oldattal tisztítani.

Kép.4

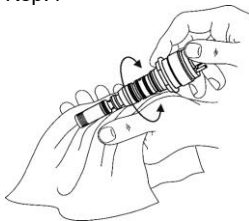

7.2. Fertőtlenítés – Kép.4

-  A györscsatlakozó külsejét ajánljuk fertőtleníteni Antivírusos fertőtlenítő folyadékokkal, amelyek hatnak a HIV vírus ellen. A fertőtlenítéstörüléssel vagy porlasztással végezzük.

-  Nem ajánlott a györscsatlakozókat fertőtlenítő folyadékokban áztatni. Ne használjon erősen alkális, vagy klórt tartalmazó fertőtlenítő vegyszereket. Györscsatlakozókat ne tisztítsa, illetve ne fertőtleníse ultrahangos tisztítóban.

7.3. Sterilizáció




A gyorscsatlakozó nem sterilizálható.



7.4. "O" gyűrűk cseréje – Kép.5

Amennyiben a gyorscsatlakozó csatlakozása átvesztene szükséges az "O" gyűrűk cseréje. A gyűrűt ujjakkal kitoljuk a bevágásból úgy, hogy a kitolt részt előre lehessen húzni és így levenni a gyűrűt


Kép. 5

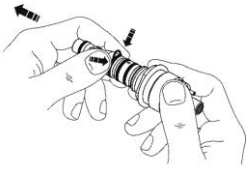

7.5. LED izzó cseréje – Kép.6

A LED izzó esetleges meghibásodásánál, lehetséges a cserélése, ezt az izzót kizárólagosan csak eredeti Chirana Medical, a.s. vagy más autorizált eladó-szerviz partnernél kapható LED izzóval lehet helyettesíteni.

Kép.6

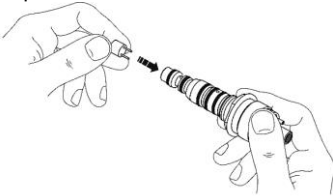

8. Javítás

Javítást a Chirana Medical, a.s. biztosítja vagy az eladó-szerviz partnerei.

9. Megjelölések



Gyártási dátum



Figyelmeztetés



Használati utasítás



Tilos a sterilizálása



Védő kesztyű használata



A készüléket tilos likvidálni a háztartási hulladékkal



Gyártó




Törékeny




Tartsa száraz helyen



Hőfok határok

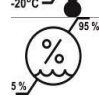

Páratartalom határok

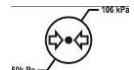

Atmoszferikus légnyomás határok

10. Készülék likvidálása



Az élettartama után a készüléket (műszert) nem szabad hagyományos hulladékokkal likvidálni. Likvidálni lehet más ipari hulladékkal, szeparált gyűjtéssel. A szeparált gyűjtés és a elektrohulladékot a forgalmazónak vagy a hulladék feldolgozónak újrahasznosításra kell leadni. A hulladék gyűjtést (készüléket, műszert) a forgalmazó ill. a eladó-szerviz partnerek biztosítják. Ezek a készüléket (műszert) átveszik a felhasználótól tisztítás, fertőtlenítés és sterilizáció után, és továbbítják a hulladék feldolgozónak, amelynek van engedélye a veszélyes hulladékkal lévő munkálatokra.

GYÁRTÓ:



Chirana Medical a.s. Stará Turá
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 STARÁ TURÁ, P.O.Box 57
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel. : +421 32 775 2323 Fax.: +421 32 775 3221
+421 918 714 000
+421 918 714 001
+421 918 714 002

medical@chirana.eu
www.chirana.eu



Registrované ochranné známky CHIRANA
Registered trade marks CHIRANA

